

HemaGel 5g

Jak snadno a rychle ošetřit ránu:

Vlhké prostředí při léčbě ran je moderní a zároveň základní podstatou ošetřování. Stabilní vlhkost v ráně zabraňuje tvorbě strupů a tím pomáhá urychlovat proces hojení.

Proč používat formu gelu k ošetřování ran? HEMAGEL díky svým vlastnostem prokázal v klinických zkouškách, že:

- chemicky váže kyslíkové radikály, které vznikají při zánětlivých procesech
- vytváří optimální pH v ráně a tím napomáhá hojení
- prověřená struktura gelu zabraňuje uvolňování částic gelu do rány s následnou iritací
- dodává vlhkost do rány
- zabraňuje vysušování rány a tvorbě strupů
- má savou schopnost a tím čistí znečištěné rány
- snižuje bolestivost ran
- již během ošetřování změkčuje a zlepšuje vzhled jizvy

Jak postupovat při použití gelu?

1. Očistěte ránu od mechanických nečistot, např. částic prachu, zbytků předchozích léčebných materiálů, které by mohly následně dráždit a poškozovat ránu
2. Otevřete tubu vpichem pomocí otočného víčka.
3. Aplikujte malé množství gelu na celou spodinu rány. Gel přilne na spodinu rány a postupně absorbuje sekrety a další tekutiny z rány.
4. Ránu kryjte sterilním čtvercem nejlépe z netkaného textilu a fixujte obinadlem nebo náplastí. Drobná poranění po nanesení gelu kryjte polštářkovou náplastí. Fixační materiály musí přesahovat cca 1 cm přes okraj rány.
5. U indikovaných pacientů s prokázanou infekcí je nutné dodržet ordinaci ATB a dalších léků dle rozhodnutí lékaře.
6. Pacienti s indikací kompresivní terapie mají léčbu doplněnou o bandáž krátkotažným obinadlem.
7. Účinek gelu se projevuje bobtnáním. Unikátní technologie gelu zabraňuje přilepení k ráně a tím umožňuje i velmi snadné odstranění bez bolesti jemným setřením.
8. Převaz provádějte dle potřeby po 24 – 48 hodinách. U infikovaných ran doporučujeme častější výměny.